

KAB 60 / KAB 30 Anwendungsanleitung - Handling



Um die Funktion der Krankenhausabfallbehälter sicher zu stellen, ist es ganz wichtig, dass die Behälter ordentlich verschlossen sind. Mit dieser Anleitung zeigen wir den Anwendern, wie sie in wenigen Schritten die Behälter verschliessen.

Ergänzend finden sie auch ein AKG Plastics Video unter dem Link:

<https://youtu.be/q1Qt4NIYUBw>

1. Schritt

Deckel ohne Druck auf den Behälter auflegen. (Bild 1)

Mit einer leichten Drehbewegung den Deckel über die Rundung des Behälters drücken. (Bild 2)

Mit wenig Druck den Deckel nach unten drücken. (Bild 3)



Bild 1



Bild 2



Bild 3

2. Schritt

Mit beiden Händen (beiden Handballen), an 3 bis 4 Stellen, mit einem kräftigen Ruck den Deckel nach unten drücken. (Bild 4, 5, 6)

Es ist jedesmal ein "Klicken" zu hören!



Bild 4



Bild 5



Bild 6

3. Schritt

Kontrollieren sie ob der Deckel rundum vollständig eingerastet ist.

Es darf kein Spalt zu sehen sein! (Bild 7)



Bild 7